



90003989_CntrXT_QRG_NL_V0 1

Uw CONTOUR[®]XT-meter

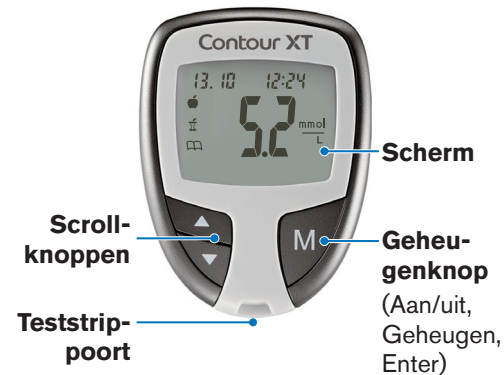

Gebruik alleen de CONTOUR[®]NEXT-teststrip

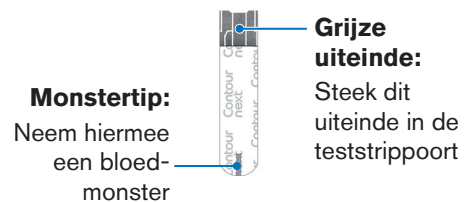


Testen Raadpleeg uw CONTOUR[®]XT-gebruikershandleiding en de bijsluiters van het prikapparaat voor volledige instructies. ⚠️ LET OP: Het in de kit geleverde prikapparaat is bedoeld voor gebruik bij één enkele patiënt.

Gereedmaken voor de test

1. Voor de test de handen goed wassen en drogen.


2. Steek het grijze uiteinde van de teststrip in de teststrip-poort van de meter.

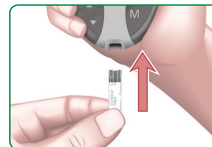


3. De meter wordt aangezet en er verschijnt een teststrip met een knipperende bloeddruppel op het scherm van de meter. Dit geeft aan dat de meter klaar is voor de test.

4. Verwijder de puntiedop van het prikapparaat.


5. Maak het ronde bescherm dopje van het lancet los door het een kwartslag te draaien, maar verwijder het niet.

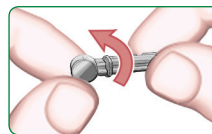


6. Steek het lancet stevig in het prikapparaat totdat het niet verder kan.

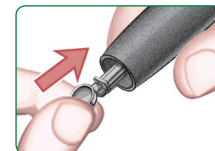


7. Draai het ronde bescherm dopje van het lancet.

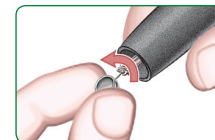

8. Plaats de puntiedop terug.

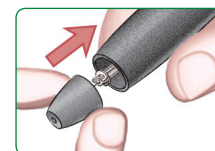

9. Stel de draaiknop van de puntiedop in op de door u gewenste prikdiepte.

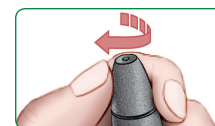

Verkrijgen van de bloeddruppel

1. Druk het prikapparaat stevig tegen de prikplaats en druk op de vrijgaveknop.




2. Wrijf over uw hand en vinger in de richting van de prikplaats zodat er een druppel bloed ontstaat.

Het testen van uw bloed

1. Gebruik uitsluitend CONTOUR NEXT-teststrips met de CONTOUR XT-meter.

2. Houd het uiteinde van de teststrip in de bloeddruppel. Het bloed wordt de teststrip ingezogen.

3. Houd de strip in de bloeddruppel totdat de meter piept.

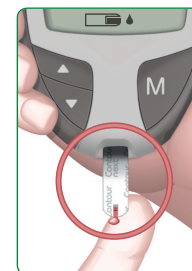

Vingerprik

4. Uw resultaat wordt na 5 seconden getoond.

5. Om de meter uit te schakelen verwijdert u de teststrip. Gooi de teststrip weg als medisch afval.



Raadpleeg de uitgebreide instructies in de bijsluiters van het prikapparaat voor het verwijderen van het lancet uit het prikapparaat. De symbolen op het prikapparaat dienen uitsluitend ter illustratie. Voor in vitro diagnostisch gebruik

Heeft u hulp nodig? 0800 235 22 937
www.diabetes.ascensia.com

06/26/19 03:32 PM

SCHAWKI 18211 NE 68th Street, E120 Redmond, WA 98052 T: 425-881-5454	PrePress Files prepressed on: July 5, 2019
	DATE: June 26, 2019 CLIENT: Ascensia Diabetes Care DESCRIPTION: Contour XT Meter Quick Reference Guide - Dutch SCHAWK JOB#: 401479260 SKU#: MULTI Parent BAN# MULTI DIMENSIONS: 4" (H) x 16.5" (W) PRINTER SPEC: 10000783886 REV 01 FONTS: Helvetica, Zapf Dingbats COLORS: Cyan Magenta Yellow Black Fold
Clinical Trial/Global Master Template No: XXXX Regional Master Template No: CntrXT_M_QRG_0052_R0003 NOTE: THIS COLOR PROOF INDICATES COLOR BREAK ONLY AND MAY NOT ACCURATELY REFLECT ACTUAL PRODUCTION COLOR.	
RELEASE: V-0 INTERNAL: R-X LANGUAGE(S): Dutch	

⚠ Mogelijk biologisch risico

Alle systemen waarmee de bloedglucose wordt bepaald, worden beschouwd als biologisch gevaarlijk.

Professionele zorgverleners of personen die gebruikmaken van dit systeem moeten de infectiecontroleprocedure volgen zoals die goedgekeurd is door hun instelling.

Alle producten of voorwerpen die met menselijk bloed in aanraking komen, moeten, zelfs nadat ze zijn schoongemaakt, behandeld worden alsof ze infectieziekten zouden kunnen verspreiden.

De gebruiker moet de aanbevelingen voor het voorkomen van door bloed overdraagbare ziekten in de gezondheidszorg opvolgen zoals deze zijn aanbevolen voor potentieel besmettelijke menselijke monsters.

Raadpleeg uw gebruiksaanwijzing voor volledige instructies.

© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Alle rechten voorbehouden.
Ascensia, het Ascensia Diabetes Care-logo, Clinilog, Contour, Glucofacts en het No Coding-logo zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

De extra functies gebruiken

Het instellen van de extra functies

Om de extra functies in uw meter in te stellen en zo uw voordeel te doen met maaltijdmarkeringen en andere beschikbare functies:

1. Druk op **M** om uw meter aan te zetten.
2. Houd dan **▲** of **▼** 3 seconden ingedrukt.
3. L-1 gaat knipperen.
4. Druk op **▲** of **▼** om naar L-2 te gaan.
5. Druk ter bevestiging op **M**.











Ontdek hoe deze extra mogelijkheden van de meter u kunnen helpen om met uw diabetes om te gaan.

Neem contact op met de Klantenservice.
0800 235 22 937

www.diabetes.ascensia.com
www.patents.ascensia.com




Nadat u een test heeft uitgevoerd en de resultaten ervan hebt gezien, gebruikt u de markeringen op het scherm:

RESULTATEN MARKEREN	U ZIET	INSTELLEN	U ZIET	WAT HET BETEKENT	GEBRUIK HERINNERINGSSIGNAAL
<p>Vóór eten</p> <p>Markeert een resultaat verkregen vóór een maaltijd. Druk op ▲ of op ▼</p>	 (Knippert)	Druk op M		Het resultaat is aangegeven als afkomstig van een vóór het eten verrichte test. Druk opnieuw op M om een herinneringssignaal in te stellen om na het eten een test te verrichten.	<p>Als het herinneringssignaal klinkt, wordt de meter aangezet en ziet u het resultaat van de vóór het eten uitgevoerde test.</p>  <p>Druk eenmaal op ongeacht welke knop om het herinneringssignaal uit te zetten en tweemaal om de meter uit te zetten. Doe nog een test en markeer deze met een ⌘ "na het eten"-teken (zie tabel links).</p>
<p>Na eten</p> <p>Markeert een resultaat verkregen na een maaltijd. Druk op ▲ of op ▼</p>	 (Knippert)	Druk op M		Het resultaat is aangegeven als afkomstig van een na het eten uitgevoerde test.	
<p>Logboek</p> <p>Markeert een resultaat als uniek of als in een bepaald opzicht anders. Druk op ▲ of op ▼</p>	 (Knippert)	Druk op M		Resultaat wordt in het geheugen als uniek gemarkeerd. U kunt dit in uw dagboek noteren.	

 Stelt een herinneringssignaal in (van te voren ingesteld op 2 uur) om een test na het eten uit te voeren. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor volledige instructies voor het gebruik van de markeringen en het aanpassen van de tijdstellingen van de herinneringssignalen.

Foutcodes en -symbolen

Raadpleeg uw gebruiksaanwijzing voor een volledige lijst met foutcodes.

E1 	Temperatuur te hoog of te laag.
E2 	Er was een probleem met het volledig vullen van de teststrip. Test opnieuw met een nieuwe teststrip.
E3 	De meter heeft gemerkt dat een al eerder gebruikte teststrip of een onjuiste controlevloeistof is gebruikt. Test opnieuw met een nieuwe teststrip.
E11	Abnormaal resultaat. Test opnieuw met een nieuwe teststrip.

 **ASCENSIA**
Diabetes Care

Lokale vertegenwoordiger:
Ascensia Diabetes Care Netherlands B.V.
Vermogenweg 107
3641 SR Mijdrecht
Nederland
Tel: 0800 235 22 937
info@diabetes.ascensia.nl
www.diabetes.ascensia.com


2797

 Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

90003989
Rev. 06/19